

## Como encher o reservatório de água

1. Deslize a trava e erga a tampa para abrir.
2. Remova o reservatório de água.
3. Encha o reservatório (pelo furo central) com água destilada ou desionizada até a marca de nível máximo (380 ml / 12,5 fl.oz.).
4. Recoloque o reservatório de água no H5i.
5. Feche a tampa, certificando-se de ouvir o clique de encaixe.



# RESMED

## AutoSet™ / AutoSet™ for Her / Elite™ / Escape Auto™ / Escape™

DISPOSITIVOS DE PRESSÃO POSITIVA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

## H5i™ / H5i™ for Her

UMIDIFICADOR AQUECIDO

## Guia de Configuração Rápida


Português



### Elementos básicos do S9

O painel de controle do seu dispositivo S9 inclui um visor LCD, um botão de iniciar/parar, um botão de selecção e as teclas de menu Info e Config.

## Montagem

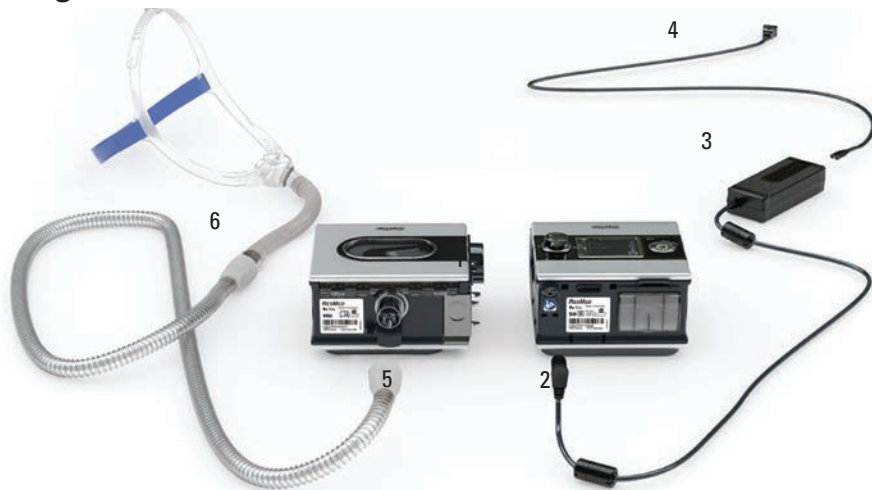

1. Alinhe o H5i ao S9 e empurre um contra o outro até ouvir o clique de encaixe.
2. Conecte o plugue CC da fonte de alimentação à parte de trás do S9.
3. Conecte o cabo de energia à fonte de alimentação.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de energia a uma tomada da rede elétrica.
5. Conecte uma das extremidades do tubo de ar firmemente à saída de ar.
6. Conecte o sistema de máscara montado à extremidade livre do tubo de ar.

### Notas:

- Para obter mais informações sobre como montar sua máscara, consulte o manual do usuário da máscara.
- Para conhecer as máscaras recomendadas, consulte [www.resmed.com](http://www.resmed.com) na página Products (Produtos) em Service & Support (Serviço e Suporte).

## Ajuste do nível de umidade

Na faixa de DESL a 6, você pode ajustar a umidade a qualquer momento até encontrar o nível mais confortável. Para ajustar o nível de umidade:



1. Na tela INÍCIO, gire até que a tela UMIDADE seja exibida em azul.
2. Pressione . A seleção é realçada em laranja.
3. Gire até que o nível de umidade necessário seja exibido.
4. Pressione para confirmar sua escolha.

## Ajuste do Climate Control


Esta função está disponível somente se o tubo de ar aquecido ClimateLine™ estiver conectado. O Climate Control (controle climático) permite-lhe ajustar a temperatura do ar até encontrar o nível mais confortável para você.



1. Na tela INÍCIO, gire até que a tela CLIMATE CTRL seja exibida em azul.
2. Pressione . A seleção é realçada em laranja.
3. Gire até que a temperatura necessária seja exibida.
4. Pressione para confirmar sua escolha.

## Ajuste do tempo de rampa

Concebido para tornar o início do tratamento mais confortável, o tempo de rampa é o período no qual a pressão aumenta de um nível inicial baixo até o valor a ser usado no tratamento. Para ajustar o tempo de rampa:

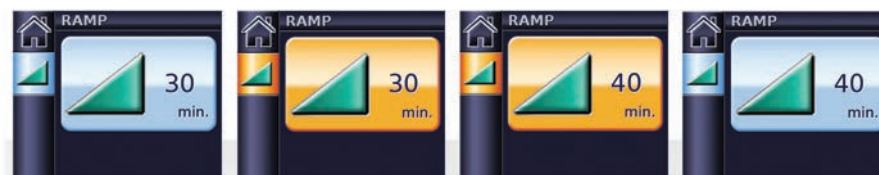

1. Na tela INÍCIO, gire até que a tela RAMPA seja exibida em azul.
2. Pressione . A seleção é realçada em laranja.
3. Gire até que o tempo de rampa necessário seja exibido.
4. Pressione para confirmar sua escolha.

## S9 Essentials

O S9 Essentials foi criado para tornar a interação com o dispositivo e o menu de navegação mais fáceis para você. Se for habilitado pelo médico, o S9 Essentials desabilita as características Info e Config, de modo que você poderá simplesmente iniciar e interromper o tratamento e ajustar rampa, umidificação e Climate Control.